	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.016	1 / 3
USO DO DESFIBRILADOR ECAFIX DF - ADULTO		Especialidade	Revisão
		TODOS	

Objetivo

PADRONIZAR O USO DO DESFIBRILADOR ECAFIX (MONOFÁSICO)

QUANDO USAR ?

Em todo paciente com suspeita de parada cardíaca:

- I. DESMAIADO (ou inconsciente: não responde quando chamado)
- II. NÃO RESPIRA (ou a respiração está parecendo em AGONIA/GASPING)
- III. SEM PULSO (se você é leigo, usar mesmo sem palpar o pulso)


*Não deve ser usado em paciente consciente, respirando bem e com pulso

COMO VERIFICAR O RITMO DO PACIENTE:


Atenção! Para monitorizar o ritmo do paciente é necessário um monitor externo antes de decidir por desfibrilar ou cardioverter, visto que o equipamento não conta com tela para monitorização de ritmo. Não é necessário retirar eletrodos de monitorização para desfibrilação ou cardioversão.

RITMOS DE PARADA NÃO CHOCÁVEIS: (manter massagem e NÃO CHOCAR!!!)

1 – ASSISTOLIA:

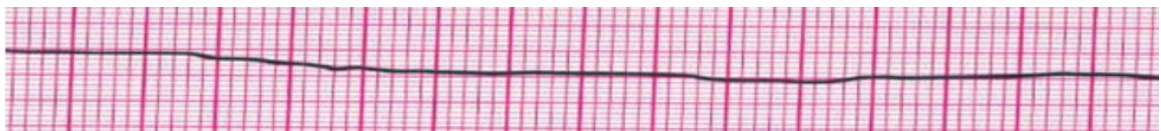

2 – AESP (ATIVIDADE ELÉTRICA SEM PULSO):

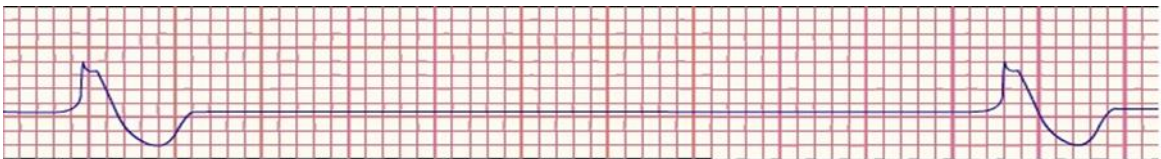

RITMOS DE PARADA CHOCÁVEIS: (SERÁ NECESSÁRIO DESFIBRILAR = CHOCAR)


1 – FIBRILAÇÃO VENTRICULAR:


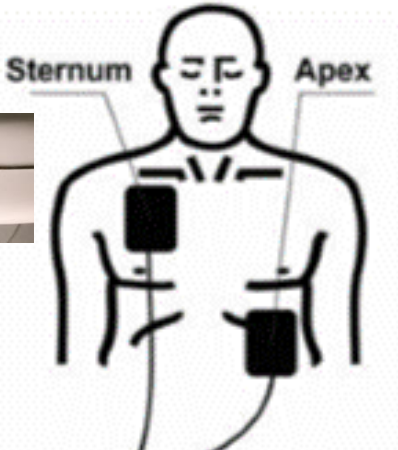






2 – TAQUICARDIA VENTRICULAR (SEM PULSO):







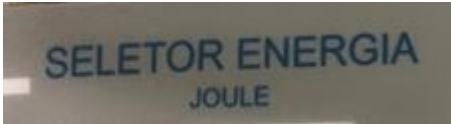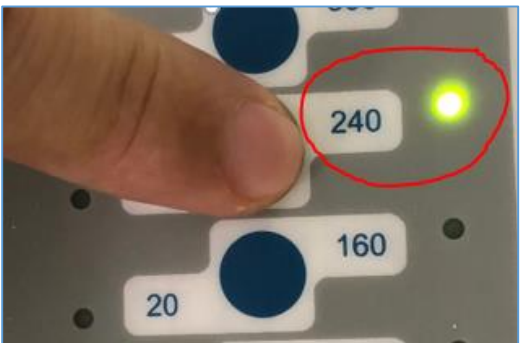

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	MARCOS PAVIONE DIRETOR TÉCNICO
Data: 03/03/2021	Data: 24/02/2021	Data: 03/03/21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.016	2 / 3
USO DO DESFIBRILADOR ECAFIX DF - ADULTO		Especialidade	Revisão
		TODOS	

COMO DESFIBRILAR UM PACIENTE UTILIZANDO O DESFIBRILADOR ECAFIX	
Responsável	Ação
Médico, enfermeiro ou técnico treinado	1. Ligar o equipamento: botão LIGA (canto inferior direito) 
	2. Abra a camisa, retire ou corte a camisa do paciente
	3. Passar o gel (azul) no tórax do paciente nos locais indicados na imagem acima
	4. Posicionar as pás sobre o tórax do paciente conforme orientações:    <p>a) A escrito ESTERNUM do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA</p> <p>b) A escrito APEX na linha da AXILA, abaixo onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal)</p>
	5. SEGUIR A SEQUÊNCIA DOS NÚMEROS 1 – 2 e 3 PARA DESFIBRILAR: 
	6. ONDE ESTÁ 1 (SELETOR DE ENERGIA), APERTE O BOTÃO PARA A CARGA DE 240 JOULES (equipamento monofásico) 

Elaborado por: MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	Aprovado por: TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	Validado por: MARCOS PAVIONE DIRETOR TÉCNICO
Data: 03/03/2021	Data: 24/02/2021	Data: 03/03/21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.016	3 / 3
USO DO DESFIBRILADOR ECAFIX DF - ADULTO		Especialidade	Revisão
		TODOS	

		<p>7. Na parte onde está o número 2: CARGA aperte o botão para carregar as pás de energia para o choque (A PARTIR DESTE MOMENTO AS PÁS ESTARÃO CARREGADAS E LUZ VERDE SE ACENDE INDICANDO O CARREGAMENTO. TENHA CUIDADO AO MANUSEAR AS PÁS).</p>	
		<p>Obs.: A qualquer momento pode-se desistir de administrar um choque, podendo descarregar as pás, apertando o botão ANULA carga:</p>	
		<p>8. Certifique-se de que as pás estão no local correto no tórax do paciente</p>	
		<p>9. Certifique-se de que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Você não está encostado na maca Ninguém da equipe está encostado na maca A fonte de oxigênio está temporariamente desligada 	
		<p>10. ADMINISTRE A DESFIBRILAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none"> APERTANDO AO MESMO TEMPO OS DOIS BOTÕES (PRETO E VERMELHO) das pás de desfibrilação <p>OU</p>	
		<p>Solicite que alguém aperte o botão de número 3, escrito DISPARO, no carrinho:</p>	
	<p>11. Retome a massagem cardíaca imediatamente, e só volte a checar o ritmo após 2 minutos de massagem cardíaca</p>		
	<p>12. OBS.: caso seja necessário um segundo choque utilizar 300 JOULES</p>		

Referências bibliográficas

Manual do equipamento e diretrizes de reanimação AHA 2020

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	MARCOS PAVIONE DIRETOR TÉCNICO
Data: 03/03/2021	Data: 24/02/2021	Data: 03/03/21