	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	1 / 4
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
		TODOS	

Objetivo





PADRONIZAR O USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 (DIFÁSICO)

QUANDO USAR ?


Em todo paciente com suspeita ou diagnóstico de parada cardíaca:

- I. DESMAIADO (ou inconsciente: não responde quando chamado)
- II. NÃO RESPIRA (ou a respiração está parecendo em AGONIA/GASPING)
- III. SEM PULSO (se você é leigo, usar mesmo sem palpar o pulso)

COMO VERIFICAR O RITMO DO PACIENTE (MONITORIZAR)

Responsável	Ação
<p>Médico, Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p> 	<p>1. Ligar o equipamento, RODANDO o BOTÃO principal para a posição MONITORIZAR</p> 
	<p>2. SELECIONAR a opção ADULTO >= 25 KG</p> 
	<p>3. Expor o tórax do paciente</p>
	<p>4. Conectar 3 eletrodos no tórax do paciente, seguindo o modelo:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. RA (right arm/branco): próximo ao braço direito (ombro direito) II. LA (left arm/preto): próximo ao braço esquerdo (ombro esquerdo) III. LL (left leg/vermelho): próximo à perna esquerda (parte de baixo da barriga à esquerda) 
	<p>5. ANALISAR O RITMO que aparecerá no monitor</p> <p>(PARAR A MASSAGEM CARDÍACA DURANTE A ANÁLISE)</p>


Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	ULLY MARIANNE F. LEMOS ENFERMEIRA DA QUALIDADE
Data: 24/02/2021	Data: 24/02/2021	Data: 22/03/2021

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	2 / 4
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
	TODOS		

LEITURA DE RITMO UTILIZANDO AS PÁS (SEM OS ELETRODOS): evitar no caso de pacientes estáveis (preferir a monitorização por eletrodos)

1. Colocar pequena quantidade de gel (cor azul) no tórax do neonato nos locais indicados abaixo (mesmo locais onde ficarão as pás)


2. **APERTAR O BOTÃO DE ECOLHA DE DERIVAÇÃO PARA O MODO PÁS:**



3. Posicionar as pás sobre o tórax do paciente conforme orientações na imagem:

a. Uma do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA (vide desenho nas costas da pá)

b. A outra escrito APEX na linha da AXILA, abaixo onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal)

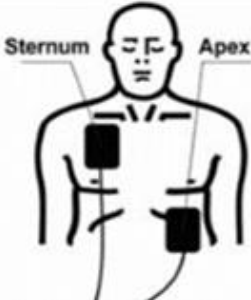


4. Certificar-se de que o contato entre as pás e o tórax é adequado, conforme a luminosidade apresentada na pá:

a. Vermelho: mal contato, melhorar

b. Amarelo: Tolerável


c. Verde: Excelente!




PARAR A MASSAGEM CARDÍACA E AGUARDAR A LEITURA:

**RITMOS DE PARADA NÃO CHOCÁVEIS:
(manter massagem e NÃO CHOCAR!!!)**


1 – ASSISTOLIA:

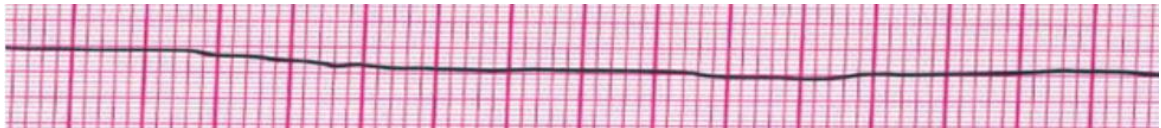

2 – AESP (ATIVIDADE ELÉTRICA SEM PULSO):

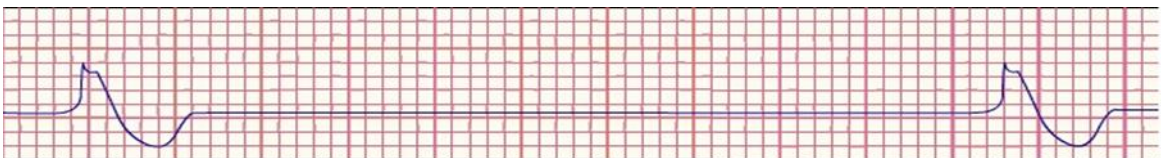

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	ULLY MARIANNE F. LEMOS ENFERMEIRA DA QUALIDADE
Data: 24/02/2021	Data: 24/02/2021	Data: 22/03/2021


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	3 / 4
		Especialidade	Revisão
		TODOS	

**RITMOS DE PARADA CHOCÁVEIS:
(SERÁ NECESSÁRIO DESFIBRILAR = CHOCAR)**



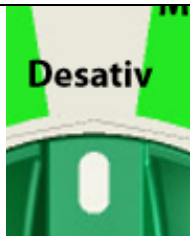
1 – FIBRILAÇÃO VENTRICULAR:




2 – TAQUICARDIA VENTRICULAR (SEM PULSO):



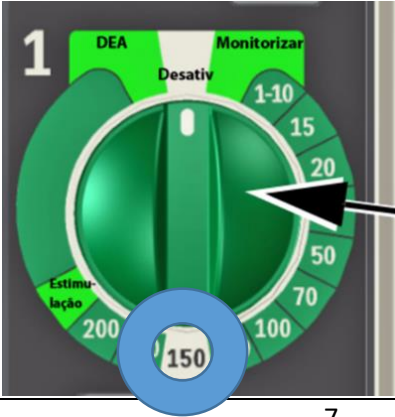

COMO DESFIBILAR (PARA RITMOS CHOCÁVEIS APENAS)



Médico ou enfermeiro	<p>6. AINDA NO BOTÃO VERDE – ESCOLHA A CARGA: COMECE COM 150 JOULES</p> 
	<p>7. Número 2: aperte o botão CARGA para carregar as pás de energia para o choque (ou apertar o botão amarela na pá de ápice) (a partir deste momento as pás estarão carregadas e luz verde se acende indicando o carregamento. tenha cuidado ao manusear as pás e não encoste uma na outra)</p> 
	<p>8. A qualquer momento você pode desistir do choque, descarregando as pás, para isto, bastando voltar o botão verde para a posição inicial (desativar)</p> 

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	ULLY MARIANNE F. LEMOS ENFERMEIRA DA QUALIDADE
Data: 24/02/2021	Data: 24/02/2021	Data: 22/03/2021

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	4 / 4
		Especialidade	Revisão
		TODOS	

	9. Certifique-se de que as pás estão no local correto no tórax do paciente
	10. Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> I. Você não está encostado na maca II. Ninguém da equipe está encostado na maca III. A fonte de oxigênio está temporariamente desligada
	11. NÚMERO 3: ADMINISTRE A DESFIBRILAÇÃO: <ul style="list-style-type: none"> I. APERTANDO AO MESMO TEMPO OS DOIS LARANJA DE CHOQUE (QUE DEVEM ESTAR PISCANDO)
	 <p>OU</p> <p>Solicite que alguém aperte o botão de número 3, escrito CHOQUE:</p> 
12. Retome a massagem cardíaca imediatamente, e só volte a checar o ritmo após 2 minutos de massagem cardíaca	
13. OBS.: caso seja necessário um segundo choque utilizar 200 JOULES	

IMPRESSÃO
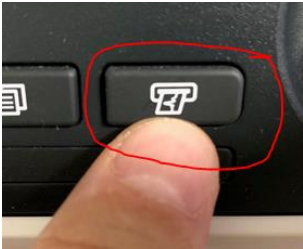
<p>PODE-SE fazer a impressão do ritmo antes da desfibrilação, mas não é prioridade.</p>	
	<p>Para isto, basta apertar o botão de impressão na parte inferior do aparelho para INICIAR e apertar o MESMO botão para PARAR a impressão:</p>
	

Manual do equipamento e diretrizes de reanimação AHA 2020

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA	TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM	ULLY MARIANNE F. LEMOS ENFERMEIRA DA QUALIDADE
Data: 24/02/2021	Data: 24/02/2021	Data: 22/03/2021