

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	1 / 5
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

Objetivo

PADRONIZAR O USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 (DIFÁSICO)

QUANDO USAR ?

Em todo paciente com suspeita ou diagnóstico de parada cardíaca:

- I. DESMAIADO (ou inconsciente: não responde quando chamado)
- II. NÃO RESPIRA (ou a respiração está parecendo em AGONIA/GASPING)
- III. SEM PULSO (se você é leigo, usar mesmo sem palpar o pulso)

COMO VERIFICAR O RITMO DO PACIENTE (MONITORIZAR)


Responsável	Ação
<p>Médico, Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p>	<p>1. Ligar o equipamento, RODANDO o BOTÃO principal para a posição MONITORIZAR</p> 
	<p>2. SELECIONAR a opção ADULTO >= 25 KG</p> 
	<p>3. Expor o tórax do paciente</p>
	<p>4. Conectar 3 eletrodos no tórax do paciente, seguindo o modelo:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. RA (right arm/branco): próximo ao braço direito (ombro direito) II. LA (left arm/preto): próximo ao braço esquerdo (ombro esquerdo) III. LL (left leg/vermelho): próximo à perna esquerda (parte de baixo da barriga à esquerda)  
	<p>5. ANALISAR O RITMO que aparecerá no monitor</p> <p>(PARAR A MASSAGEM CARDÍACA DURANTE A ANÁLISE)</p>

LEITURA DE RITMO UTILIZANDO AS PÁS (SEM OS ELETRODOS): evitar no caso de pacientes estáveis (preferir a monitorização por eletrodos)

1. Colocar pequena quantidade de gel (cor azul) no tórax do neonato nos locais indicados abaixo (mesmo locais onde ficarão as pás)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	2 / 5
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
		TODOS	1


2. APERTAR O BOTÃO DE ECOLHA DE DERIVAÇÃO PARA O MODO PÁS:

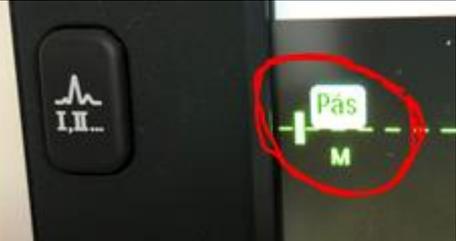

3. Posicionar as pás sobre o tórax do paciente conforme orientações na imagem:

a. Uma do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA (vide desenho nas costas da pá)

b. A outra escrito APEX na linha da AXILA, abaixo onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal)

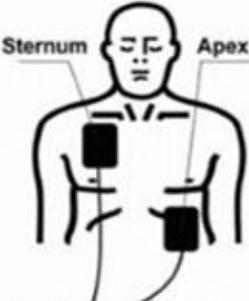

4. Certificar-se de que o contato entre as pás e o tórax é adequado, conforme a luminosidade apresentada na pá:

a. Vermelho: mal contato, melhorar

b. Amarelo: Tolerável


c. Verde: Excelente!




PARAR A MASSAGEM CARDÍACA E AGUARDAR A LEITURA:

**RITMOS DE PARADA NÃO CHOCÁVEIS:
(manter massagem e NÃO CHOCAR!!!)**

1 – ASSISTOLIA:

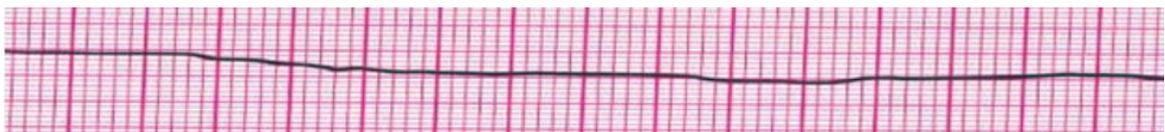

2 – AESP (ATIVIDADE ELÉTRICA SEM PULSO):

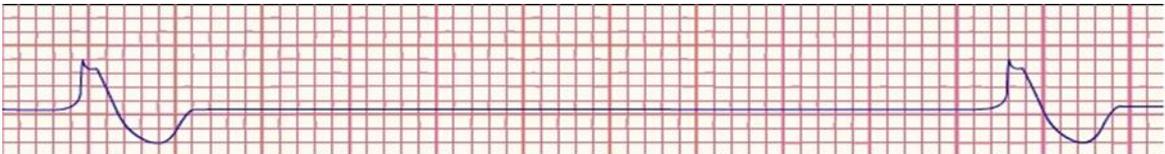

**RITMOS DE PARADA CHOCÁVEIS:
(SERÁ NECESSÁRIO DESFIBRILAR = CHOCAR)**

1 – FIBRILAÇÃO VENTRICULAR:



2 – TAQUICARDIA VENTRICULAR (SEM PULSO):



COMO DESFIBILAR (PARA RITMOS CHOCÁVEIS APENAS)

Médico ou enfermeiro

6. AINDA NO BOTÃO VERDE – ESCOLHA A CARGA:
COMECE COM **150 JOULES**




7. Número 2: aperte o botão **CARGA** para carregar as pás de energia para o choque (ou apertar o botão amarela



na pá de ápice)

(a partir deste momento as pás estarão carregadas e luz verde se acende indicando o carregamento. tenha cuidado ao manusear as pás e não encoste uma na outra)

8. A qualquer momento você pode desistir do choque, descarregando as pás, para isto, bastando voltar o botão verde para a posição inicial (desativar)

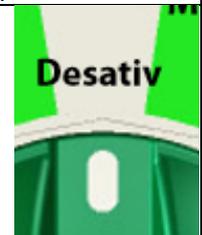

9. Certifique-se de que as pás estão no local correto no tórax do paciente


10. Certifique-se de que:

- I. **Você não está encostado na maca**
- II. **Ninguém da equipe está encostado na maca**
- III. **A fonte de oxigênio está temporariamente desligada**

11. NÚMERO 3: ADMINISTRE A DESFIBRILAÇÃO:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	4 / 5
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

I. APERTANDO AO MESMO TEMPO OS DOIS LARANJA DE CHOQUE (QUE DEVEM ESTAR PISCANDO)

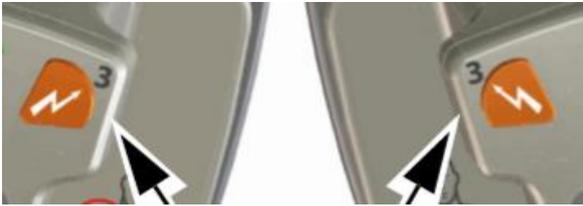

OU
Solicite que alguém aperte o botão de número 3, escrito CHOQUE:



12. Retome a massagem cardíaca imediatamente, e só volte a checar o ritmo após 2 minutos de massagem cardíaca


13. OBS.: caso seja necessário um segundo choque utilizar 200 JOULES

IMPRESSÃO




PODE-SE fazer a impressão do ritmo antes da desfibrilação, mas não é prioridade.



Para isto, basta apertar o botão de impressão na parte inferior do aparelho para INICIAR e apertar o MESMO botão para PARAR a impressão:

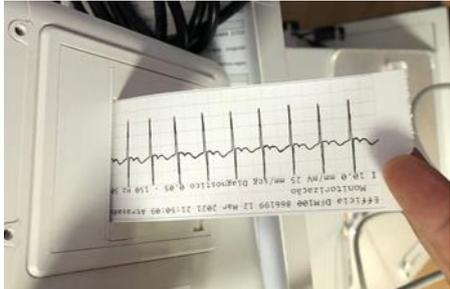

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.017	5 / 5
	DESFIBRILAÇÃO COM USO DO DESFIBRILADOR PHILIPS DFM 100 em ADULTOS	Especialidade	Revisão
	TODOS	1	

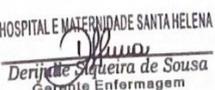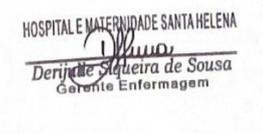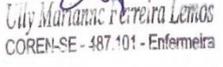Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	DERIJULIE SIQUEIRA Gerente de Enfermagem	ULLY MARIANNE F. LEMOS Coord. da Qualidade
Data: 24/02/2021	Data: 12/04/2024	Data: 16/04/2024	Data: 17/04/2024
Assinaturas e carimbo:			
     			

Histórico das últimas duas revisões

Nº	Descrição das alterações:	Data:
1.	Ajuste conforme gestão de documentos	12/04/2024
2.		