

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.023	1 / 3
	UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MANTA TÉRMICA – WARM TOUCH	Especialidade	Revisão
		Direção Técnica	1

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA INDICAÇÃO DA MANTA TÉRMICA		
Técnico de enfermagem ou enfermeiro	Avaliar a temperatura do paciente, conforme protocolo específico (PROT.DT.018 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AURICULAR COM TERMÔMETRO TIMPÂNICO ou PROT.DT.019 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR COM TERMÔMETRO DIGITAL);	
	Identificar pacientes com hipotermia, onde esteja indicado o uso da manta térmica;	
	Identificar pacientes cirúrgicos onde esteja indicado o uso profilático da manta durante o procedimento cirúrgico (idosos > 60 anos, crianças e procedimentos com tempo previsto acima de 1 hora);	
	Identificar pacientes pós parada cardíaca que esteja indicado uso da manta para resfriamento (usar a manta a 34°C);	
Médico	Preencher e assinar o relatório para uso da manta térmica.	
DESCRIÇÃO DO USO		
Colocar um lençol sobre o paciente (não colocar a manta em contato direto com a pele, para reduzir a contaminação das mesmas com secreção e sangue);		
Colocar a manta sobre o lençol com os furos voltados para o lado do paciente (pode ser colocado outro lençol ou cobertor acima da manta);		
Prender a manta no cano corrugado por meio do clip plástico na parte azul do conector; OBSERVAÇÃO: No cano corrugado tem uma presilha que pode prender o cano no colchão para não ficar escorregando.		
		
Conectar o aparelho na tomada, de acordo com a voltagem indicada; ATENÇÃO! Existem mantas de voltagem 110V e 220V. SEMPRE VERIFICAR A VOLTAGEM INDICADA NO APARELHO ANTES DE CONECTÁ-LO;		
Ligar o aparelho, apertando o botão redondo ao lado esquerdo da telinha principal (uma luzinha verde se acenderá);		
Após ligar, escolher a temperatura de aquecimento do paciente, apertando o botão ao lado da sua opção. ATENÇÃO! Seguir orientação abaixo.		
		
TEMPERATURA ESCOLHIDA	INDICAÇÃO	TEMPERATURA REAL QUE ESTARÁ CHEGANDO AO PACIENTE

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.023	2 / 3
	UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MANTA TÉRMICA – WARM TOUCH	Especialidade	Revisão
		Direção Técnica	1

40 °C	Escolha preferencial: para aquecer pacientes com hipotermia leve (34,5 a 35,9 °C) em que não há urgência para normotermia rápida	38 °C
45 °C	Temperatura alta: usar para aquecer pacientes com hipotermia moderada (32 a 34,4 °C)	42 °C
47 °C <i>Obs.: após 45 minutos passará automaticamente para 45 °C</i>	Temperatura MUITO ALTA: utilizar em pacientes com hipotermia importante (< 32 °C) ou quando se quer aumento rápido da temperatura (ex.: paciente instável e hipotérmico em pós-operatório)	44 °C
34 °C	Usada para manter hipotermia ou normotermia terapêutica pós PCR	32 °C
Botão desligar calor (abaixo do botão ventiladorzinho)	Usada para promover o resfriamento do paciente	Temperatura ambiente

Após 10 minutos, conferir a temperatura do paciente e ajustar conforme necessário (cuidado para não promover hipertermia). Geralmente em 6 minutos já ocorre a normalização da temperatura;

Se quiser parar o aquecimento temporariamente, sem desligar o aparelho, apertar o botão ventilador e entra em modo de espera (o valor da temperatura será substituído por dois tracinhos na telinha);



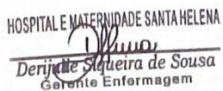
Para desligar, apertar novamente o botão redondinho.

CUIDADOS GERAIS

- Em caso de sujidade, limpar com álcool 70%;
- Não descartar a manta após o uso, caso não esteja com sangue ou secreções visíveis;
- Em caso de ficar piscando um sinal no formato de triângulo na tela e o aparelho ficar apitando, retirar a manta do paciente, desligar o aparelho e aguardar manutenção do mesmo;
- Após o uso, enrolar os fios atrás do aparelho e encaixar a parte azul da mangueira corrugada no encaixe próprio do aparelho e colocar a capa protetora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Manual do Equipamento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	DERIJULIE SIQUEIRA Gerente de Enfermagem	ULLY MARIANNE F. LEMOS Coord. da Qualidade
Data: 21/02/2020	Data: 15/04/2024	Data: 17/04/2024	Data: 18/04/2024
Assinaturas e carimbo:			
  			

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.023	3 / 3
	UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MANTA TÉRMICA – WARM TOUCH	Especialidade	Revisão
		Direção Técnica	1

Histórico das últimas duas revisões

Nº	Descrição das alterações:	Data:
1.	Ajuste conforme gestão de documentos (2 anos)	15/04/2024
2.		